


# Unitron Remote Plus Android スマートフォンとの Bluetooth 接続方法


※ Android は、機種・Android OS のバージョンによって画面表示や操作が異なる場合があります。  
わからない場合はメーカーまたはご購入の販売店でご確認ください。ここでは一例として、Google Pixel (OS バージョン: 15) にて説明しております。

※ 必要条件: Android OS バージョン 8.0 以降の Android™ 端末

## スマホとの接続

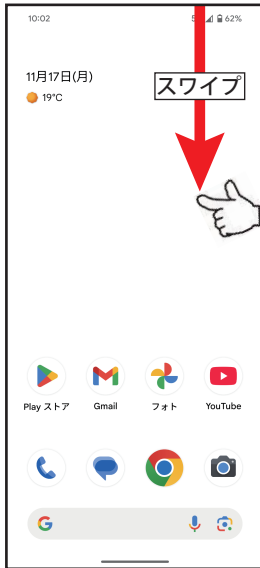


① ホーム画面上から中ほどへ向かってスワイプします。

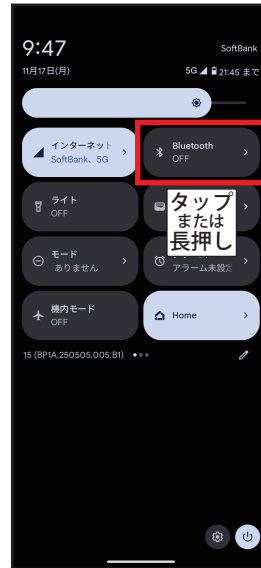


② 「Bluetooth」部分をタップまたは長押しします。




③ 「新しいデバイスとペア設定」をタップします。

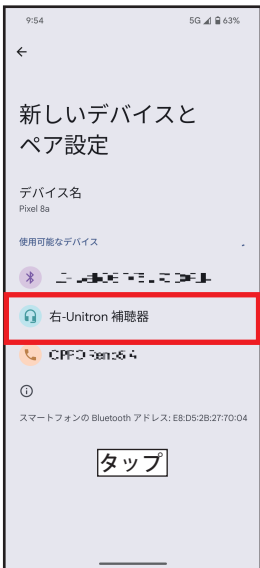

④ 「右 - Unitron 補聴器」をタップします。

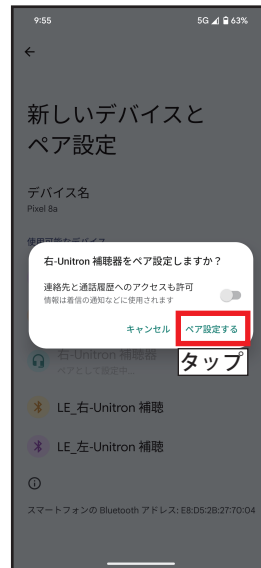

⑤ 「ペア設定する」をタップします。「許可」ポップアップ画面が出てくる場合は、許可して進めてください。

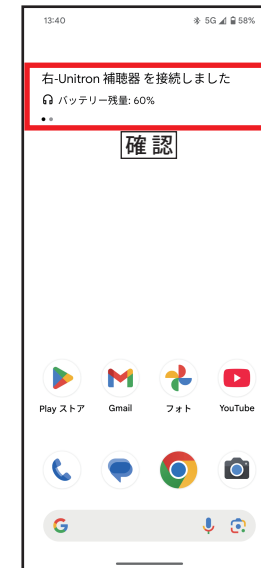

⑥ Bluetooth の接続が完了しました。ポップアップで確認画面が出る場合があります。

# Unitron Remote Plus Android スマートフォンとの Bluetooth 接続方法

## アプリのダウンロード




① 「Play ストア」アイコンをタップします。




② 上部赤枠「検索」部で「unitron remote」と打ち込み、検索します。  
③ 検索後表示された Unitron Remote Plus の「インストール」をタップします。

## アプリとの接続

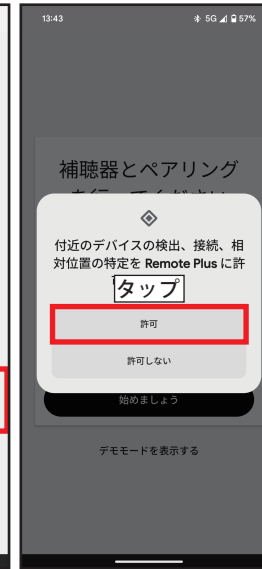


① アプリを起動し画面に従い「補聴器検知」の画面へ移動します。  
もし「付近のデバイス～」のウィンドウが開いたら、「許可」をクリックします。


## アプリとの接続

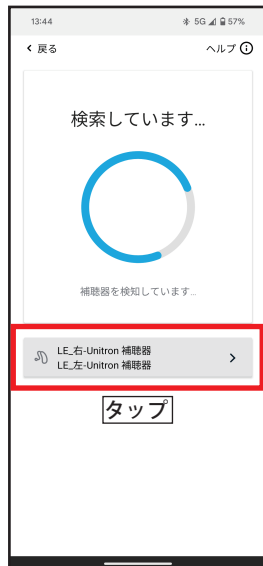

② 「検索しています ...」画面になりましたら補聴器の電源を入れます。補聴器が検知されると自動的に表示されます。両耳接続される場合は、両耳とも表示されてからタップしてください。

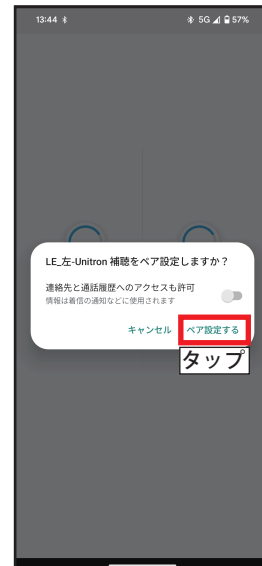


③ 「ペア設定する」をタップします。両耳接続する場合は2度出てきますのでそれぞれタップしてください。また「許可」ポップアップ画面が出てくる場合は、許可して進めてください。

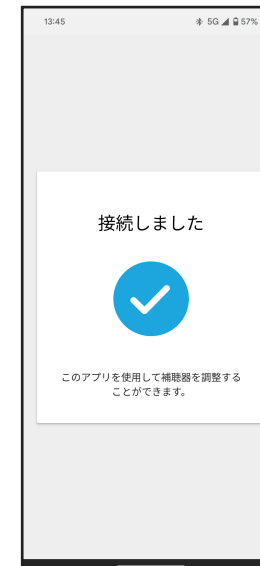

④ 接続が完了するとこの画面になり、しばらく待つと次の画面に切り替わります。

# Unitron Remote Plus Android スマートフォンとの Bluetooth 接続方法

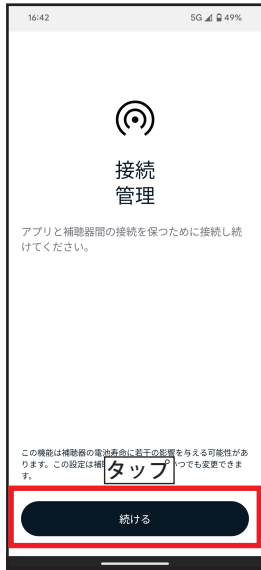

5 ここからは「補聴器をみつける」に必要な設定です。「続ける」をタップします。



6 「常に許可」をタップします。



7 「アプリの使用時のみ」をタップします。



8 「アドバンスド」になっていることを確認します。その後、「確認する」をタップします。



9 アプリと補聴器の接続が完了しました。

# Unitron Remote Plus AndroidスマートフォンとのBluetooth接続「解除」方法

## アプリとの接続解除




① アプリの下部にある「補聴器」アイコンをタップします。




② 開いた一番下にある「私の補聴器」部分をタップします。

▶ アプリを使用しない等何らかの理由ができてアプリとの接続を解除したい場合は、左記の要領で行ってください。

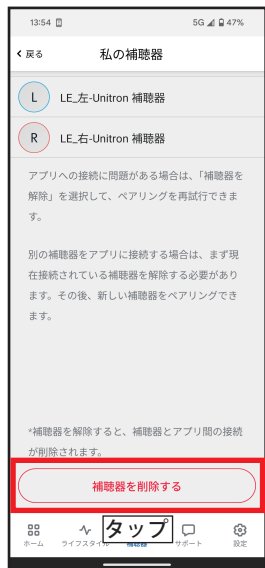

③ 「補聴器を削除する」をタップします。

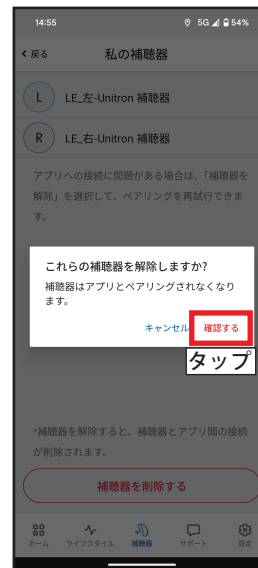


④ 開いたウィンドウの「確認する」をタップします。


▶ 補聴器の接続不具合や器種変更された場合も一旦削除して再度最初から接続しなおすことで、スムーズな再接続が可能となります。

# Unitron Remote Plus Android スマートフォンとの Bluetooth 接続方法


## スマホとの接続解除

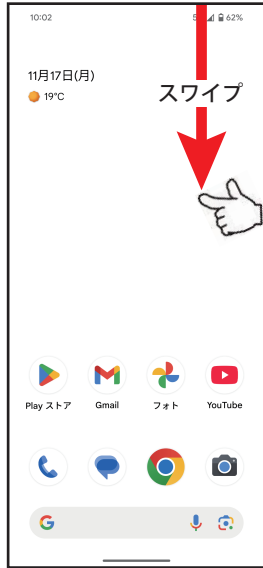

① ホーム画面上から中ほどに向けてスワイプします。

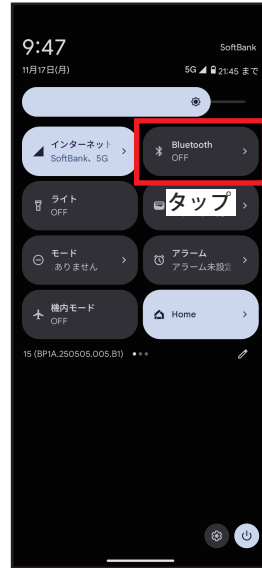

② 「Bluetooth」部分をタップまたは長押しします。

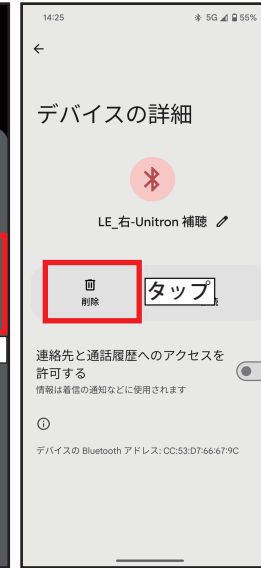


③ アプリとの接続解除は「LE 右 (左) - Unitron 補聴器」の歯車部分をタップします。開いた画面から「削除」をタップします。



④ スマホとの接続解除は「右 - Unitron 補聴器」の歯車部分をタップします。

⑤ 接続を完全に切りたい場合は「削除」を、一時的に停止したい時は「接続を解除」または下の「電話」「メディアの音声」をタップでオフにします。

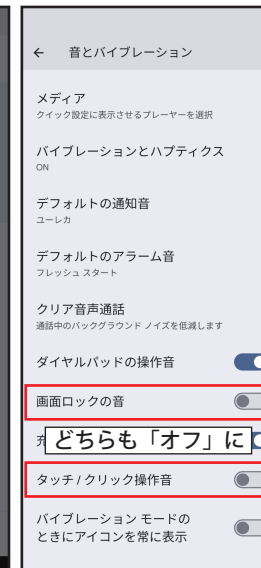

※ このようなメッセージが表示された場合は、「設定」画面から、「音とバイブレーション」の中の「画面ロックの音」「タッチ/クリック操作音」をオフにします。

この画面は Google Pixel8 の画面です。機種により名称の違う場合がありますのでご確認ください。