

STEP1 補聴器とアプリのペアリング

【リモートプラスのダウンロード】
「App Store」または「Play Store」より入手可能です。

Unitron Remote Plus

で検索してください。

iOS Ver.16.0以降のApple iPhone
Android OS Ver.10.0以降のAndroid
スマートフォンで機能します。

「Insera Smile」より接続方法が若干変わりました。
アプリとストリーミングどちらも使用する場合は、
アプリ側からどちらも接続可能となります。




ダウンロードした
「Remote Plus」
のアイコンを
タップします。




もしこの画面が
出たら
「許可」
をタップします。



「続ける」
をタップします。

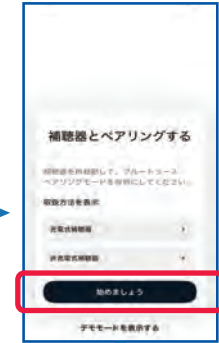

「はじめよう」
をタップします。
指示があれば
補聴器の再起動
を行い、「続ける」
をタップします。

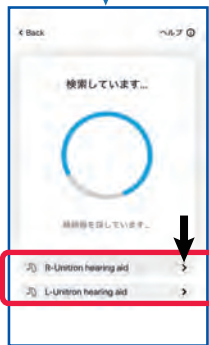


補聴器の検出
が始まります。
検出されたら、
「>」部分を
タップします。




「ペアリング」
をタップします。
(両耳の場合は
2回出てきます)



「接続しました」
が表示されます。
しばらく待つと
次の画面に移動
します。

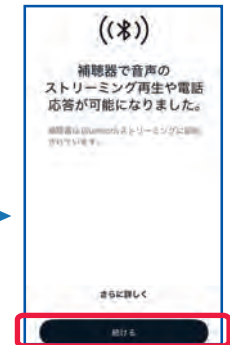


「続ける」
をタップします。

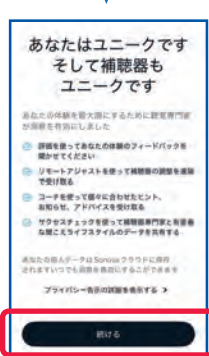

「続ける」
をタップします。



「OK」
をタップします。
次ページでは
「許可」
をタップします。

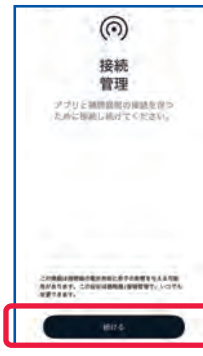

「続ける」
をタップします。



しばらく待つと
調整画面になり
ます。

お使いになる前に... **Insera Smile** ではBluetooth対応のすべての携帯電話と直接無線通信ができます。

「リモートプラス」アプリをインストールしない場合は直接Bluetoothにて補聴器と接続でき、通話や動画などのストリーミングを行う事が出来るようになります。 ※Bluetoothのバージョンや「ハンズフリープロファイル」に対応していない機種については接続できません。

STEP2 補聴器とデバイスのペアリング

iPhone

① Bluetooth機能をONにする



「設定」を開き、「Bluetooth」をタップします。

② デバイス(補聴器)の登録をする



「Bluetooth」をオンにし、補聴器の電源を入れます。
次にデバイスに出てくる「右(左)-Untron補聴器」をタップします。



「接続済み」になったら、画面を閉じて下さい。
これでデバイスと補聴器のペアリングが完了しました。電話をハンズフリーにてお使いいただけます。

Android

① Bluetooth機能をONにする



ホーム画面の上から中央へスワイプします。




「Bluetooth」部分をタップします


② デバイス(補聴器)の登録をする



「Bluetooth を使用」をONにしてから「新しいデバイスとペア設定」をタップします

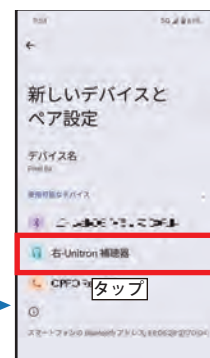

「右-Untron 補聴器」をタップします

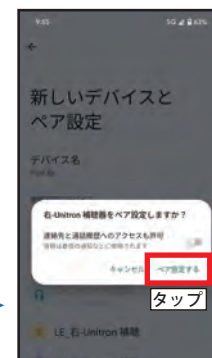

「ペア設定する」をタップします

※ Android (ガラホ含む) につきましては、7ページのQRコードより弊社のホームページにて別冊の接続マニュアルをご用意しております。そちらもご参照ください。
※ Android (ガラホ含む) の機種によって操作方法や文言が違う場合がございます。詳しくは携帯販売店、もしくは携帯各メーカーにお問い合わせください。

～両耳の補聴器のペアリング～

※ 電話やストリーミングを使用する為のハンズフリーのペアリングは、フィッティングソフトで指定した方の補聴器のみの接続になります。(初期設定は右耳)
ただし通話音声については、スマホと接続された補聴器からもう一方の補聴器に通信されて、両耳から聴こえてきます。

※ 両耳に補聴器を装用の場合、リモートプラスアプリへのペアリングはかならず「両耳」ともペアリングを行って下さい。

アプリとペアリングができないとき

以前にも「Remort Plus」で補聴器をペアリングしたことがある場合、同じ補聴器であってもうまく再ペアリングができないことがあります。その時はアプリの内とスマホ側の「設定」⇒「Bluetooth」から接続情報を削除した上で改めてアプリ内から補聴器のペアリングを行うことで接続がスムーズにできます。

携帯で行うこと

※ これは iPhone の画面になります。Android 機は、それぞれ取扱説明書に従って行ってください。



「設定」をタップします。



「Bluetooth」をタップします。



「〇_Unitron 補聴器」の青い「①」アイコンをタップします。



「このデバイスの登録を解除」をタップします。
(両耳の場合は左右それぞれ1回ずつ)


アプリで行うこと




下部、「補聴器」をタップします。



「私の補聴器」をタップします。

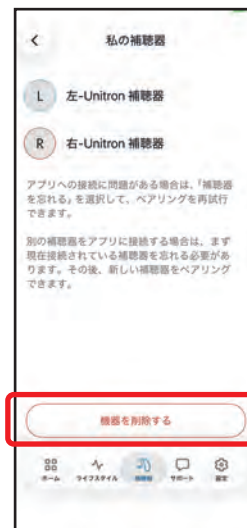

「機器を削除する」をタップします。

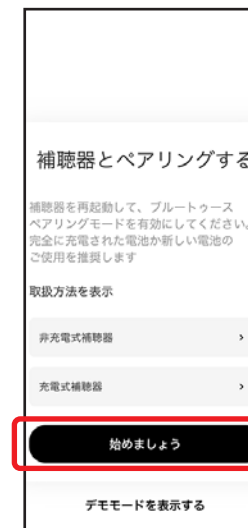

再度ペアリングの画面になります。「始めましょう」をタップします。

【「Remort Plus」の機能】

「Remort Plus」には大別して5つの画面があり、それぞれ画面下のナビゲーションメニューから開くことができます。

① ホーム



基本の画面です。この画面から簡単にプログラムの切り替えや音質調節等の画面に移動できます。下部の「ホーム」ボタンをタップするといつでもこの画面に戻れます。

② ライフスタイル



内容確認と各環境下でどれくらい使用しているかを確認できます。

③ 補聴器




オプションを使用して補聴器の設定変更ができます。
 「タップコントロール」
 「Bluetoothストリーミング」
 「オート電源オン」
 「ハンズフリー通話」
 「リモートアジャスト」
 「補聴器を探す」
 「接続管理」
 「私の補聴器」
 それぞれで調整可能。

新機能



「補聴器を探す」は補聴器がどこにあるのかを確認できます。隠れていたり置き忘れた場合もわかります。(Vivante以降のみ)
 「接続管理」は必要ない場合を除いてこのままにします。

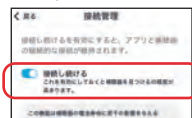

④ サポート



補聴器を使用する上でのヒントや操作方法の動画などが確認可能。

⑤ 設定



それぞれの項目でアプリの設定が変更できます。
 「アプリモード」
 「様子」
 「洞察設定」
 「通知センター」
 「分析」
 「デモモード」

【プログラムの切替え】



【現在のプログラム】

アイコン部分を左右にスワイプするとプログラムの切替え可能。



【ボリューム調節】



スライダーを左右に動かしてボリューム調節ができます。

ここをタップすると、左右別々にボリュームの調節と消音/出音ができます。

ミュートボタンです。タップすると消音にできます。再度タップすると戻ります。



【クイックボタン】



「普通」
 「快適性」
 「明瞭性」
 で切り替えが可能です。切り換えたい所をタップします。




「普通」 初期状態。変化なし
 「快適性」 人の声がない状態で周りの騒音を下げたい時。


「明瞭性」 騒音を抑えつつ、人の言葉をはっきりさせたい時。子音強調。



「低 / 中 / 高音調節」、「指向性幅」、「子音強調」、「雑音抑制」を設定できます。



アイコン部のをタップします。

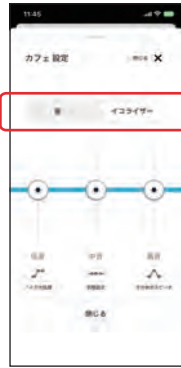

「音」
「イコライザー」
を切り換えて調整
します。

音

イコライザー

【低音 / 中音 / 高音】

低音域 / 中音域 / 高音域のバランスを調節できます。



それぞれ上下に
調節が可能です。



【プリセット】

ボタンのワンタップで調節できるプリセット調整もあります。



3つのプリセットの
ひとつをタップし
ます。



タップした音質に
なりました。
ここから微調整も可能
です。

音


イコライザー

【フォーカスマイク】

指向性の幅を調節し、聞きたい範囲を選択できます。




左右にスライドして
調節できます。

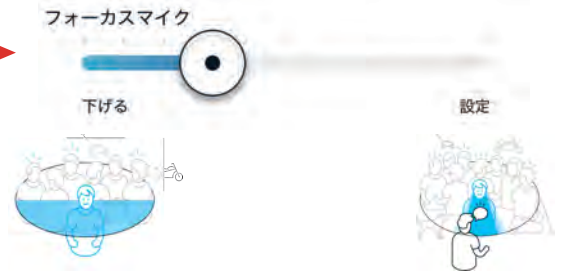

【会話を強調】

子音を強調することで言葉をよりはっきりさせます。

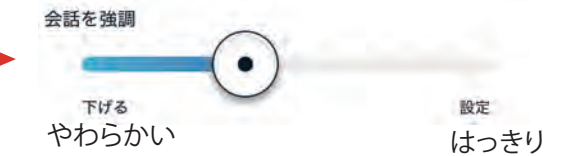

【ノイズを削減】（雑音抑制）

環境音を抑制し、快適さと言葉の聞き取りやすさを確保します。



【プログラムを管理】

ご自分の欲しいプログラムを下記どちらかの方法で任意追加できます。
7つすべての追加も可能です。（※ 車内360度は両耳装着時のみ表示）



「プログラムを管理」
をタップします。




追加したいプログラムの
名称部をタップします。

追加したいプログラムの
「+」をタップします。



そのプログラムの
プレビューが表示
され、動作確認後
追加（保存）する
かどうか選べます。

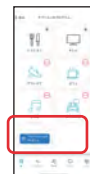

プログラムがワン
タッチで追加でき
ます。





プログラムが追加
されました。





【プログラム名変更】

わかりやすい名称に変更できます。

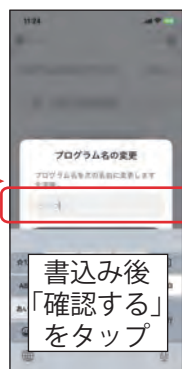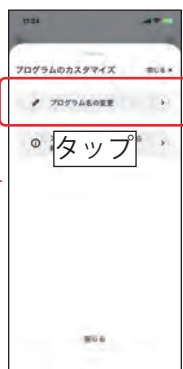

【追加プログラム削除】

追加したプログラムを削除します。（追加プログラムのみ。元プログラムでは表示なし）

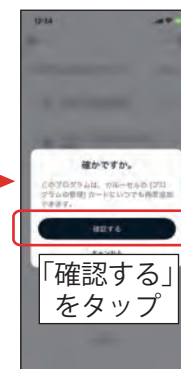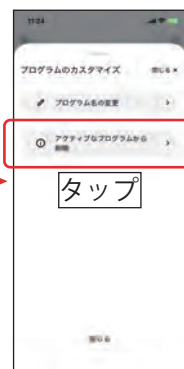

【聞こえ体験】


現在の聞こえ方を、アイコン等で販売店へお知らせする機能（要 店舗での設定）



タップ




選択

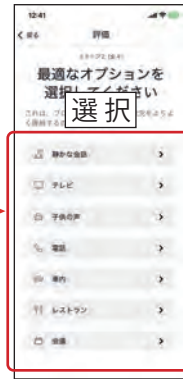

選択



選択

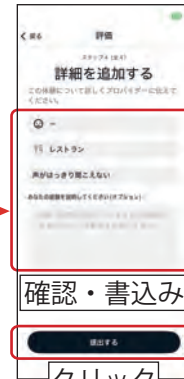

確認・書込み

クリック

【その他】

「アプリモード」：以前のモードを好まれる方に



以前と違う部分：
クラシックモードでは、「低・中・高」での調整ができません。
可能なのはアドバンスドモードのみです。

【その他】

「様子」：画面のカスタマイズ




プログラム部分に写真を使うかどうかや背景色の変更を選択します。

「表示を合わせる」をタップしてオフにするとアプリ内での変更が可能となります。

オンのままだとスマートフォンの設定と同じ状態になります。アプリ内でのみの変更はできません。

【その他】

Bluetoothの切り替え

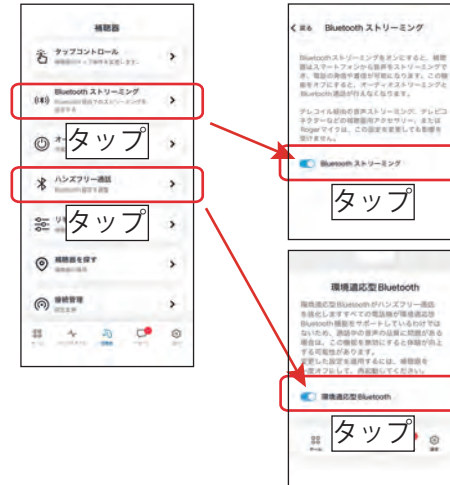


Bluetoothを介しての通話やストリーミングもここからワンタップで簡単にオン・オフが可能になりました。

もしBluetooth接続したときの音声（通話/ストリーミング）がブツブツ切れたり音質が悪い場合は、「ハンズフリー通話」の中にある「環境適応型Bluetooth」を「オフ」にしてみてください。

【その他】

必ず補聴器で電話等を取る場合の設定（iPhoneの場合）

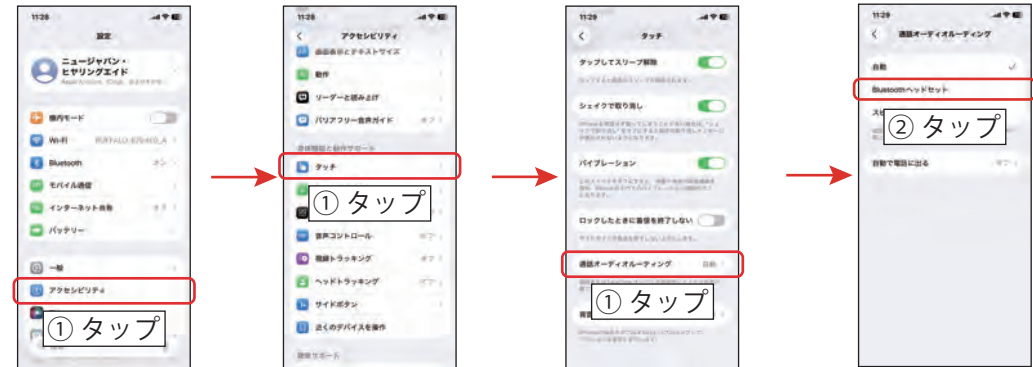

1. 「設定」⇒「アクセシビリティ」⇒「タッチ」⇒「通話オーディオルーティング」の順でタップします。
2. 「Bluetoothヘッドセット」をタップします。

※これはiPhone専用となります。

Android機は、メーカーによってやり方が違う可能性があります。ご使用の機種のご取扱説明書に沿って設定をお願いいたします。右のQRコードより、弊社ホームページ最下段にてAndroid機接続一例の別冊接続マニュアルおよびQ&Aがご覧いただけます。

